

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
Вагинальный гель на основе гиалуроновой кислоты
GYNODEK® (ГИНОДЕК®)

Описание

GYNODEK® (ГИНОДЕК®) - вагинальный гель, в состав которого входит декаметоксин и гиалуроновая кислота. Гель имеет однородную, вязкую консистенцию, без запаха.

Содержание упаковки

Вагинальный гель на основе гиалуроновой кислоты

GYNODEK® (ГИНОДЕК®) в контейнерах полимерных, по 7 контейнеров в пачке из картона.

Состав:

Вагинальный гель на основе гиалуроновой кислоты 0,5%, 5 мл в контейнере полимерном, содержит:

Декаметоксин.....1,0 мг
Гиалуронат натрия.....25,0 мг
Лактатный буфер pH 3,8-4,5 до 5,0 мг

Показания к применению

- Инфекционно-воспалительные заболевания половых органов.
- Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным вмешательством, малых диагностических операциях, перед родами, искусственным прерыванием беременности, до и после установки внутриматочной спирали).
- Состояния, сопровождающиеся сухостью слизистой оболочки влагалища (дистрофические изменения слизистой оболочки в постменопаузальный период, раздражение, жжение, зуд в результате частых спринцеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, приема антибиотиков, гормонов, контрацептивов).
- Для облегчения естественных родов, для защиты промежности во время естественных родов.
- При преждевременных родах, после разрыва амниотического мешка.
- Профилактика инфекций, передающихся половым путем.

Механизм действия

GYNODEK® (ГИНОДЕК®) - вагинальный гель, в состав которого входит декаметоксин и гиалуроновая кислота. Гель поддерживает pH и влажность слизистой влагалища, благодаря чему помогает формировать нормальную микрофлору, защищает от различных инфекций, устраняет дискомфорт и сухость в половых органах.

Декаметоксин оказывает антимикробное, противогрибковое действие и концентрируется на цитоплазматической мембране (ЦПМ) микробной клетки и соединяется с фосфатидными группами липидов мембран, нарушая проницаемость ЦПМ микроорганизмов. Декаметоксин высокоактивен в отношении микроорганизмов устойчивых к антибиотикам. Декаметоксин не всасывается слизистыми оболочками, неповрежденной кожей и раневой поверхностью.

Гиалуроновая кислота имеет свойство связывать воду, чем обеспечивает поддержание влажности в слизистой оболочке влагалища, проявляет регенерирующие и ранозаживляющие свойства, а также улучшает восстановительные процессы в слизистой оболочке влагалища.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав геля.

Способ применения и дозы

Только для интравагинального применения!

Контейнер полимерный содержит 8 мл геля, из которых около 5 мл попадают во влагалище во время введения.

Рекомендуемая доза при состояниях, сопровождающихся сухостью слизистой оболочки влагалища и инфекционно-воспалительных заболеваниях половых органов составляет 5 мл 1-2 раза в сутки, курс лечения - 7-10 дней.

Для профилактики инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии рекомендуемая доза составляет 5 мл. Для облегчения естественных родов, для защиты промежности во время естественных родов, при преждевременных родах, после разрыва амниотического мешка рекомендуемая доза составляет 5-30 мл. Гель вводят во время вагинальных обследований во время родов, начиная с первого вагинального обследования. При каждом вагинальном обследовании необходимо нанести 3-5 мл геля на стерильную перчатку и равномерно распределить это количество по родовым путям. Для лучшего нанесения можно использовать вагинальный аппликатор. Дополнительное введение геля следует проводить через 15-30 минут после разрыва амниотического мешка.

Количество, необходимое для одних родов, в среднем составляет от 10 до 30 мл геля.

Для профилактики инфекций, передающихся половым путем, рекомендуется применять 5 мл геля не позднее чем через 2 часа после незащищенного полового акта.

Контейнер полимерный

1. Повернуть пломбу против часовой стрелки и удалить ее.
2. Наконечник контейнера ввести в положении сидя или лежа как можно глубже во влагалище.
3. Выдавить содержимое контейнера во влагалище.
4. Допускается остаток небольшого количества геля в контейнере полимерном после использования.

Побочное действие

При возникновении таких побочных реакций, как гиперемия, сыпь, зуд, а также в случае проявления каких-либо других побочных реакций, прекратите использование и обратитесь к врачу.

Несовместимость

Декаметоксин является катионным поверхностно-активным веществом, поэтому он несовместим с мылом и другими анионными соединениями.

Предостережение

При применении GYNODEK® (ГИНОДЕК®) внешний туалет влагалища можно проводить с помощью чистой воды без применения мыла.

Проверяйте срок годности и целостность упаковки перед использованием.

Не используйте изделие, если истек срок годности или повреждена упаковка.

При беременности и в период лактации перед применением проконсультируйтесь с вашим врачом.

Не следует применять в качестве средства контрацепции.

Срок годности: 2 года.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре от +5 °C до +30 °C. Не замораживать.

Название и адрес производителя

ООО «Юрия-Фарм», Украина, 03038, г. Киев, ул. Н.Амосова, 10.
Тел: +38 (040) 275-92-42; +38 (044) 275-01-08 www.uf.ua
Адрес производства: Украина, 18030, м. Черкаси, ул. Кобзарька, 108

Дата последнего пересмотра: 22.06.2018 г.