

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**із застосування медичного виробу**  
**Вагінальний гель на основі гіалуронової кислоти**  
**GYNODEK® (ГІНОДЕК®)**

**Опис**

GYNODEK® (ГІНОДЕК®) – вагінальний гель, до складу якого входить декаметоксин та гіалуронова кислота. Гель має однорідну, в'язку консистенцію, без запаху.

**Вміст пакування****Вагінальний гель на основі гіалуронової кислоти**

GYNODEK® (ГІНОДЕК®) у контейнерах полімерних, по 7 контейнерів у пачці з картону.

**Склад:**

**Вагінальний гель на основі гіалуронової кислоти 0,5%, 5 мл в контейнері полімерному, містить:**

Декаметоксин .....1,0 мг  
Гіалуронат натрію.....25,0 мг  
Лактатний буфер рН 3,8-4,5 .....до 5,0 мг

**Показання до застосування**

- Інфекційно-запальні захворювання статевих органів.
- Профілактика інфекційно-запальних ускладнень в акушерстві та гінекології (перед оперативним втручанням, малих діагностичних операціях, перед пологами, штучне переривання вагітності, до і після установки внутрішньоматкової спіралі).
- Стани, що супроводжуються сухістю слизової оболонки піхви (дистрофічні зміни слизової оболонки в постменопаузі, роздратування, печіння, свербіж в результаті частих спринцювань, захворювань шлунково-кишкового тракту, прийому антибіотиків, гормонів, контрацептивів).
- Для полегшення природних пологів, для захисту промежини під час природних пологів.
- При передчасних пологах, після розриву амніотичного мішка.
- Профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом.

**Механізм дії**

GYNODEK® (ГІНОДЕК®) - вагінальний гель, до складу якого входить декаметоксин і гіалуронова кислота. Гель підтримує рН і вологість слизової піхви, завдяки чому допомагає формувати нормальну мікрофлору, захищає від різних інфекцій, усуває дискомфорт і сухість в статевих органах.

Декаметоксин чинить антимікробну, протигрибкову дію та концентрується на цитоплазматичній мембрані (ЦПМ) мікробної клітини і з'єднується з фосфатидними групами ліпідів мембран, порушуючи проникність ЦПМ мікроорганізмів. Декаметоксин високоактивний щодо мікроорганізмів стійких до антибіотиків. Декаметоксин не всмоктується слизовими оболонками, неушкодженою шкірою і рановий поверхнею. Гіалуронова кислота має властивість зв'язувати воду, чим забезпечує підтримку вологості в слизовій оболонці піхви, проявляє регенеруючі і ранозагоювальні властивості, а також покращує відновні процеси в слизовій оболонці піхви.

**Протипоказання**

Індивідуальна непереносимість компонентів, що входять до складу гелю.

**Спосіб застосування та дози**

*Тільки для інтравагінального застосування!*

Контейнер полімерний містить 8 мл гелю, з яких близько 5 мл потрапляють в піхву під час введення.

Рекомендована доза при станах, що супроводжуються сухістю слизової оболонки піхви та інфекційно-запальних захворюваннях статевих органів становить 5 мл 1-2 рази на добу, курс лікування - 7-10 днів.

Для профілактики інфекційно-запальних ускладнень в акушерстві та гінекології рекомендована доза становить 5 мл. Для полегшення природних пологів, для захисту промежини під час природних пологів, при передчасних пологах, після розриву амніотичного мішка рекомендована доза становить 5-30 мл. Гель вводять під час вагінальних обстежень під час пологів, починаючи з першого вагінального обстеження. При кожному вагінальному обстеженні необхідно нанести 3-5 мл гелю на стерильну рукавичку і рівномірно розподілити цю кількість по родових шляхах. Для кращого нанесення можна використовувати вагінальний аплікатор. Додаткове введення гелю слід проводити через 15-30 хвилин після розриву амніотичного мішка. Кількість, необхідна для одних пологів, в середньому становить від 10 до 30 мл гелю.

Для профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, рекомендується застосовувати 5 мл гелю не пізніше ніж через 2 години після незахищеного статевих акту.

**Контейнер полімерний**

1. Повернути пломбу проти годинникової стрілки і видалити її.
2. Наконечник контейнера ввести в положенні сидячи або лежачи якомога глибше в піхву.
3. Видавити вміст контейнера в піхву.

Допускається залишок невеликої кількості гелю в контейнері полімерному після використання.

**Побічні реакції**

При виникненні таких побічних реакцій, як гіперемія, висип, свербіж, а також в разі прояву будь-яких інших побічних реакцій, припиніть використання і зверніться до лікаря.

**Несумісність**

Декаметоксин є катіонною поверхнево-активною речовиною, тому він несумісний з милом та іншими аніонними сполуками.

**Належні заходи безпеки при застосуванні**

При застосуванні GYNODEK® (ГІНОДЕК®) зовнішній туалет піхви можна проводити за допомогою чистої води без застосування мила.

Перевіряйте термін придатності і цілісність упаковки перед використанням.

Не використовуйте виріб, якщо минув термін придатності або пошкоджена упаковка.

**При вагітності і в період лактації перед застосуванням проконсультуйтеся з вашим лікарем.**

Не слід застосовувати як засіб контрацепції.

**Термін придатності: 2 роки.**

**Умови зберігання**

Зберігати в сухому, захищеному від сонячних променів, недоступному для дітей місці при температурі від +5°C до +30°C. Не заморозувати.

**Назва та адреса виробника**

ТОВ «Юрія-Фарм», Україна, 03038, г. Київ, ул. М.Амосова, 10.  
Тел: +38 (040) 275-92-42; +38 (044) 275-01-08 [www.uf.ua](http://www.uf.ua)  
Адреса виробництва: Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Кобзарька, 108

**Дата останнього перегляду: 22.06.2018 р.**